



## Návod k montáži a používání

### Aul 05.\_LK – Automatický nerezový žlab závěsný s kulatými vnitřními kouty – pro lékaře

#### Základní technické údaje

Vnější (vnitřní) rozměr AUL 05.1LK	1250 (1190) x 430 (330) x 420 (180÷200)
AUL 05.2LK	1900 (1840) x 430 (330) x 420 (180÷200)
AUL 05.3LK	2500 (2440) x 430 (330) x 420 (170÷200)
AUL 05.4LK	2995 (2940) x 430 (330) x 420 (170÷200)
Průměr odpadu:	D 40 mm
Webová stránka produktu:	<a href="#">AUL 05.LK</a>

#### Popis nerezového žlabu

- AUL 05.\_LK je nerezový umývací s kulatými vnitřními kouty určený k zavěšení na stěnu.
- Konstrukce žlabu umožňuje instalaci výtokových ramének, případně použití bezdotykově ovládaných baterií.
- Provedení žlabu je levé nebo pravé – dle umístění odpadu při pohledu na žlab zepředu. Žlab je vyroben z nerezů jakosti AISI 316 L.
- Žlab je z čelní a bočních stran zakrytovaný.


#### Instalace nerezového žlabu

##### Stavební připravenost


- Připraven přívod vody a odpad (D) dle obrázku

##### Montáž nerezového žlabu

1. Osadit závěsnou lištu – upevnit vruty do hmoždinek ve zdi. Dodané hmoždinky a vruty umožňují osadit lištu do dostatečně nosné stěny (plné cihly, beton atd.). Při montáži na stěnu z jiného materiálu (duté cihly, plynosilikáty atd.) je nutno použít kotevní materiál určený pro tento typ zdi.
2. Zavěsit žlab na lištu a zkontrolovat vodorovnost horní hrany.
3. Pomocí vrtů a hmoždinek zajistit čela žlabu.
4. Přívodní hadice zapojit na rohové ventily na přívodu teplé a studené vody.
5. Osadit sifon.
6. Spáru mezi žlabem a stěnou zatmelit vhodným tmelem, aby nedocházelo k zatékání vody.

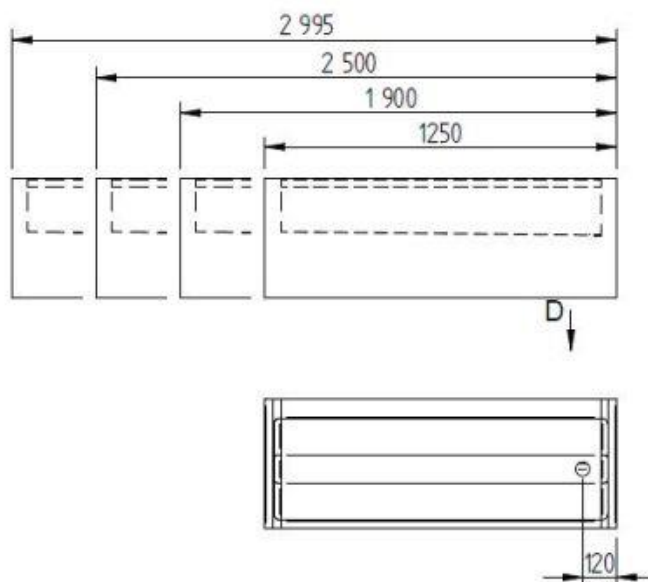

D – odpad  
A – studená voda G 1/2"  
B – teplá voda G 1/2"

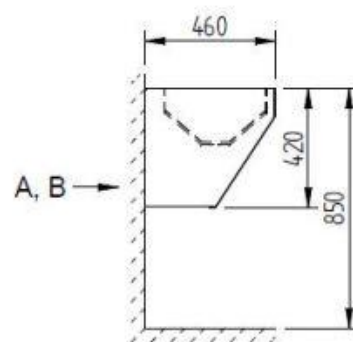



## Dodaný materiál

- nerezové koryto -1 ks
- hmoždinky, vruty a podložky - 7÷10 ks
- plastová zápachová uzávěra - 1 ks

## Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 346 (AISI 316), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
  - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
  - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

## Upozornění

- Pokud je žlab používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlabu způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití žlab řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.